

Trousse de prélèvement de salive - directives

Trousses avec entonnoir et bouchon contenant un liquide bleu

Public
Health
Ontario


Santé
publique
Ontario

Consultez les directives de prélèvement de salive pour le test de la COVID-19 sur le site Web de Santé publique Ontario pour en savoir davantage sur la procédure à suivre avant et après le prélèvement de salive.


Note : Les trousses de prélèvement de salive peuvent contenir un entonnoir ou une paille, parfois accompagnés d'un sachet d'eau saline pour le rinçage ou d'un bouchon contenant un liquide bleu pour le transport.



- 1**
- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
 - Vérifiez le contenu de la trousse de prélèvement (illustré dans l'image du haut, à droite).

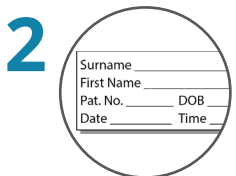

- 2**
- Assurez-vous que les renseignements suivants figurent sur le tube :
- Nom complet
 - Date du prélèvement
 - Un autre identifiant particulier (p. ex. date de naissance ou numéro de carte Santé).

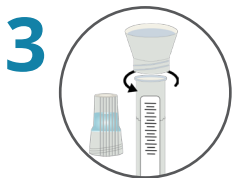

- 3**
- S'il était placé sur le tube, retirez le bouchon du tube et placez-le à l'envers sur une surface propre.
 - Insérez l'entonnoir dans le tube et veillez à ce qu'il tienne bien en place dans l'ouverture du tube.



- 4**
- Si vous portez un masque, retirez-le.



- 5**
- Laissez la salive s'accumuler dans votre bouche.
- Conseil :** Pour favoriser la production de salive, vous pouvez frotter l'intérieur de votre joue avec votre langue.




- 6**
- À l'aide de l'entonnoir, crachez lentement et délicatement votre salive directement dans le tube.

Note : Prenez votre temps en vous assurant d'éviter les éclaboussures et déversements.

- Continuez jusqu'à ce que le niveau dans le tube atteigne la ligne de remplissage (approx. 2 à 3 ml) sans compter les bulles.

Cela peut prendre de 2 à 5 minutes.

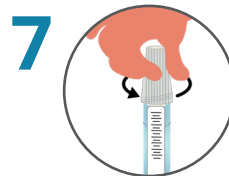

- 7**
- Retirez l'entonnoir et jetez-le.
 - Remplacez le bouchon sur le tube.
 - Vissez le bouchon sur le tube jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que le liquide bleu se mélange au contenu du tube.

Note : N'ouvrez PAS le tube de nouveau et NE retirez PAS son contenu.

- Brassez le tube pendant quelques secondes afin de mélanger la salive et le liquide bleu.



- 8**
- Assurez-vous que le bouchon soit bien fermé.
 - Essuyez l'extérieur du tube et du bouchon à l'aide d'un essuie-tout propre.
 - Assurez-vous que l'étiquette soit bien remplie (voir l'Étape 2).

- Placez le tube dans le sac transparent pour matières contaminées et le formulaire de demande d'analyse dûment rempli dans la pochette extérieure du sac.



- 9**
- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
 - Si vous portiez un masque, remettez-le.